

卓上型高圧蒸気滅菌器 パールクレーブ

# PEARL CLAVE TC-240GS

コストパフォーマンスを追及したオートクレーブ

容量  
増加

連続  
運転

予約  
機能

低温  
乾燥



TC-240GS




# 現場のパフォーマンス向上を 実現する充実した機能

TC-240GS



## ◆ 大容量15L


これまでの丸カスト18cmサイズ製品のチャンバー容量は13L～13.5Lでしたが14.9Lになり、間口は220mmから235mmとサイズアップしました。

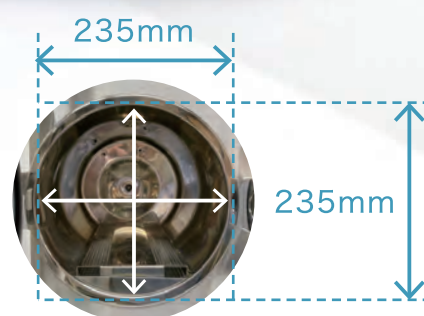

## ◆ 連続運転可能

連続運転とは…1サイクルが終了してから、次のサイクルの給水が始まるまでの待ち時間(冷却時間)が不要で運転可能なことを指します。


2回の滅菌乾燥を行う場合

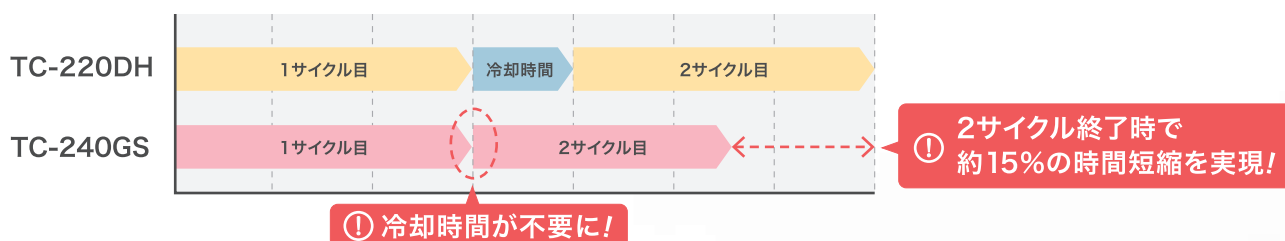

※ 当社製品比較 ※ 使用環境や運転条件により稼働率は異なります。  
※ 給水から乾燥までの全行程を[1サイクル]と表現しています。

## ◆ 予約機能

滅菌乾燥を完了させたい時刻に合わせた予約が可能です。  
細かな時間設定が行えます。

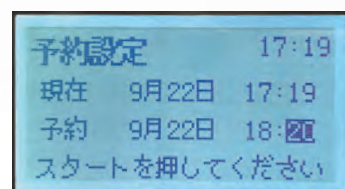

## ◆ 低温乾燥

3つの乾燥モード「低温」「標準」「高温」の選択が可能です。「低温」は、熱による形状変化や劣化など、滅菌物損傷防止に適しています。

## 液晶モニターとイラストキーで 操作しやすさに配慮



### ● 液晶モニター

操作に必要な情報をビジュアル的に分かりやすく表示します。

### ● メニューキー

滅菌乾燥設定をはじめ、日付、音量、清掃メッセージ等がメニューキー選択により設定できます。

### ● 乾燥キー

「低温」「標準」「高温」3つの乾燥モードを搭載  
滅菌物に応じて選択できます。

### ● イラストキー

滅菌設定選択も、滅菌対象物に合わせてワンタッチで選択できます。

## 2重ロックで安全性を確保

扉の開閉は、2重ロックで制御して安全性を高めました。

ロックの動作は、開閉からロックまで一つの流れで簡単に行えます。




ロック①  
ハンドルを右へスライド



ロック②  
そのまま下に下げる

# TC-240GS 仕様

## 外形寸法 <mm>

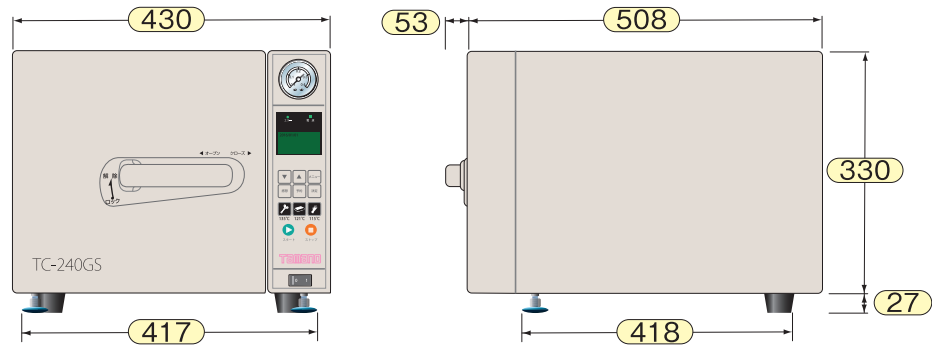

チャンバー寸法	(W)φ235mm×340mm(有効寸法)	
チャンバー容量	14.9L(丸カスト 18cm×2個)	
電源電圧	AC100V 15A 50/60Hz	
消費電力	1.35kVA	
重量	約 28kg	
貯水槽容量	4.6L(適水量 4.3L)	
滅菌温度	115℃ / 121℃ / 135℃	
滅菌モード	115℃	滅菌時間：初期設定 38分(～99分変更可能)
	121℃	滅菌時間：初期設定 24分(～99分変更可能)
	135℃	滅菌時間：初期設定 7分(～99分変更可能)
乾燥モード	低温	乾燥時間：初期設定 30分(0～99分変更可能)
	標準	乾燥時間：初期設定 30分(0～99分変更可能)
	高温	乾燥時間：初期設定 30分(0～99分変更可能)
乾燥方式	加圧乾燥制御方式	
表示	モノクロ液晶	
安全弁吹出圧力	0.26MPa	
安全装置	安全弁/温度ヒューズ/空焚き防止温度ヒューズ/漏電ブレーカー	
認証番号	227AIBZX00006000	
許可番号	13B2X10064	

架台



丸カスト



半月カゴ



## 電源



コンセントプラグ



コンセント  
125V 15A

## オプション

角カスト



滅菌バッグ



衛生で笑顔を

**tamano** 滅菌器総合メーカー **株式会社タマノ**

〒173-0026 東京都板橋区中丸町18-10

☎ : 03-3974-9600 ㊟ : 03-3974-9650

🌐 : www.kabu-tamano.co.jp



製品の使用方法  
お手入れ方法等  
はこちらまで。

🏪 特約店 タマノ製品の各地域、地方のお問合せ先

🏪 関西地域 特約店  
**株式会社スタリード**

兵庫県尼崎市西本町6丁目242  
☎ : 06-6430-2235 ㊟ : 06-6430-2236

🏪 中国地方 特約店  
**エムステック株式会社**

広島県広島市佐伯区五日市駅前2-15-3  
☎ : 082-554-5377 ㊟ : 082-554-5378