

PEARL CLAVE

パールクレーブ TC-220DH

高性能マイコン制御により機能性を向上。
滅菌・乾燥効果を追求しました。



高性能・多機能タイプ！ 滅菌・乾燥効果は抜群です。



TC-220DH

特徴

高性能マイコン制御

高性能マイコンによるプログラム制御により、機能性を向上させました。

加圧排気制御方式

加圧排気制御により、蒸気の浸透性を高め、滅菌効果を向上させました。

加圧乾燥制御方式

高性能エアポンプによる加圧乾燥制御により、乾燥効果を向上させました。

高性能温度コントロール

常にチャンパー内の温度を監視し、コントロールします。

自己診断機能

常にプログラム動作を監視し、チェックします。

プログラム選択方式

5種類の滅菌プログラムにより、被滅菌物にあわせて選択することができます。

優れた操作性・機能性

●わかりやすいディスプレイ

3種類のディスプレイにより、温度・時間、等が一目で確認できます。

●かんたんプログラム選択

5種類の滅菌プログラムをワンタッチで簡単に選択することができます。

●便利な予約機能

予約機能により、6日後までの予約をすることができます。

●使いやすい乾燥機能

乾燥プログラムにより、再乾燥をすることができます。

●見やすい行程表示灯

7種類の行程表示により、運転中の行程が見やすく、一目で確認できます。

●ワンタッチ操作で簡単運転

一度プログラムをセットすると、次回から起動キーを押すだけで選択されたプログラムでの運転を開始します。

●停止キー

運転中に停止・緊急排気します。

●アップキー

プログラムの設定温度・時間を変更します。

●ダウンキー

プログラムの設定温度・時間を変更します。

●安心な電源スイッチ

非常停止機能付電源スイッチにより、非常時に自動的にOFFします。

滅菌プログラム

5種類の滅菌プログラム

通常滅菌:4種類(標準モード3種類、フリーモード1種類)

液体滅菌:1種類(ボトルモード1種類)

初期設定

モード	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
標準	121℃	20分	30分
	132℃	10分	30分
	135℃	3分	30分
フリー	126℃	15分	30分
ボトル	115℃	50分	-

●標準モード

初期設定の滅菌温度(滅菌・乾燥時間変更可)で通常滅菌することができます。

●フリーモード

滅菌プログラムの温度・時間を任意の滅菌条件に変更し、通常滅菌することができます。(変更された滅菌条件の設定は、記憶されます。)


●ボトルモード

ボトル(滅菌ビン)に入れた水を液体滅菌することができます。

仕様


型式 **TC-220DH**

承認番号 21900BZX00828000

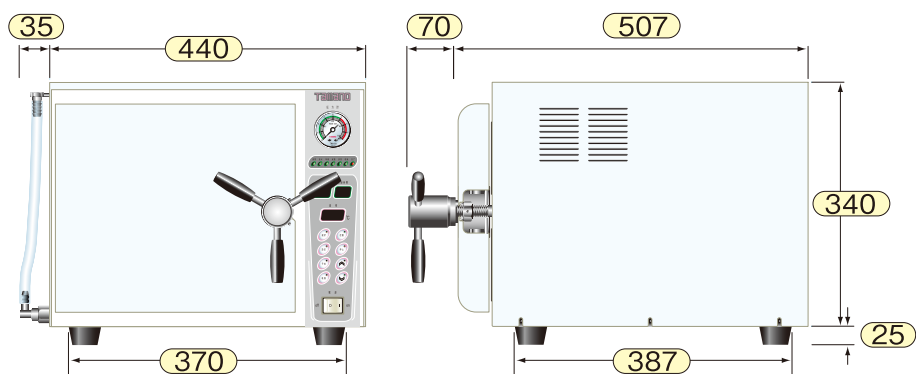

チャンパー寸法	(W) φ220mm×(D) 345mm (有効寸法)	
チャンパー容量	13.5L (丸カストφ18cm×2個/ボトル 250cc×8本)	
貯水タンク容量	3.0L (注水容量)	
電源電圧	AC100V 15A 50/60Hz	
消費電力	1.3kVA	
重量	約30kg	
滅菌プログラム	標準×4 (標準モード×3・フリーモード×1)、液体×1 (ボトルモード×1)	
滅菌温度	標準モード	121℃ / 132℃ / 135℃
	フリーモード	126℃ (115～135℃迄1℃単位で設定可)
	ボトルモード	115℃
滅菌時間	標準モード	20分 / 10分 / 3分 (初期設定～60分迄1分単位で設定可)
	フリーモード	15分 (3～60分迄1分単位で設定可)
	ボトルモード	50分 (50～60分迄1分単位で設定可)
乾燥方式	加圧乾燥制御方式	
乾燥時間	標準 (初期設定) 30分 (0～95分迄5分単位で設定可)	
使用圧力	0.26MPa	
安全装置	異常高温防止装置、異常高圧防止装置、圧力安全弁、非常停止機能付電源スイッチ、扉閉スイッチ、漏電ブレーカー	
許可番号	13B2X10064	

TC-220DS/TC-220DH 専用オプション

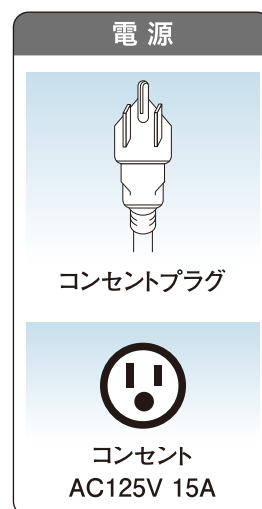

販売店

ご購入・ご相談は、下記へお問い合わせください。



本社 〒173-0026 東京都板橋区中丸町18-10 TEL03(3974)9600 FAX03(3974)9650
 新潟営業所 〒950-2004 新潟市西区平島1301 中野プラザ106 TEL025(233)3377
 大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満1-3-12 高尾ビル1F TEL06(6352)6440
 URL: <http://www.kabu-tamano.co.jp>